



Быстрый запуск URYXXON® Relax

Проведение анализа мочи и ежедневное техническое обслуживание

Для проведения анализа используйте свежий образец мочи, собранный не больше 2 часов назад. Охлажденные образцы мочи должны нагреться до комнатной температуры перед проведением анализа (15-30 °C). **Прочитайте это руководство перед проведением анализа. Тщательно соблюдайте все инструкции.**


Проведение анализа



Шаг 1. Включите анализатор. Убедитесь, что держатель для тест-полосок чистый.



Шаг 2. Погрузите полоску в образец мочи. Убедитесь, что вы намочили все цветные ячейки теста. Извлеките тест-полоску из мочи через 1 секунду. Поставьте тест-полоску на бок (длинную сторону) на контейнер с мочой, чтобы избавиться от излишков мочи. Используйте только тест-полоски Combi 10 Vet.

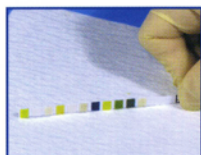

Шаг 3. Быстро дотроньтесь длинной стороной тест-полоски (примерно на 1 секунду) до впитывающего бумажного полотенца, чтобы промокнуть излишки мочи.



Шаг 4. Поместите тест-полоску в держатель для полосок. Убедитесь, что цветные ячейки на тест-полоске находятся сверху (с лицевой стороны). Измерение начнется автоматически. Анализатор притянет полоску внутрь через 30 секунд. **ВАЖНО:** Не удаляйте тест-полоску из держателя до окончания измерения.




Шаг 5. Когда измерение будет закончено, результат анализа будет напечатан.



Шаг 6. Выбросьте использованную тест-полоску. Протрите держатель от остатков мочи.

Ежедневное техническое обслуживание

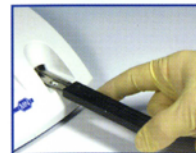

Ежедневно промывайте держатель для полосок водой и дезинфицирующим средством. Потяните за держатель для полосок, чтобы вытащить его из анализатора. Сполосните держатель водой. Удалите весь кристаллический осадок мягкой кистью. Протрите держатель 70% спиртом или любым другим дезинфицирующим средством. Просушите мягкой тряпочкой. Вставьте держатель в анализатор.



Замена бумаги в принтере



Откройте крышку принтера, надавив на выделенный квадрат, рядом с прорезью для выхода результата анализа. Удалите использованный рулончик бумаги. Вставьте новый рулончик бумаги, разместите его свободным краем вверх. Раскатайте примерно 10 см бумаги. Закройте крышку.



Контроль качества

Проверяйте положительные и отрицательные контрольные образцы при открытии каждой новой тубы. Никогда не используйте воду в качестве отрицательного образца.

Техническая поддержка

Эл. адрес: info@diagnostika.ws

